

## Sizing and Measuring Guide

Circumference measurements required to provide pressures of between 10-15 mm Hg

Art No.	Size	Product Width (cm)	Limb Size (cm)
1436	<b>B</b>	6.0 - 6.4	12.5 - 15
1443	<b>C</b>	6.6 - 7.2	15 - 24.5
1437	<b>D</b>	7.3 - 7.9	24.5 - 35.5
1434	<b>E</b>	8.7 - 9.2	35.5 - 45
1438	<b>F</b>	9.7 - 10.3	45 - 50.5
1439	<b>G</b>	11.3 - 12.7	50.5 - 60.7
1440	<b>J</b>	17.4 - 19.3	60.7 - 73

Measure around the widest part of the area  
**ALWAYS USE AS A DOUBLE LAYER**

Directions for use

**Warning: Contains natural rubber latex.**



1. Cut Tubigrip to twice length required for limb, allowing an extra 2-3 cm for overlap.



2. Pull Tubigrip onto limb like a stocking.



3. Double Tubigrip back over limb. Ensure upper edge is taken 2-3 cm higher up the limb than the first.

## Guide de tailles et de mesures

Les mesures de circonférence sont nécessaires pour fournir les pressions entre 10 et 15 mm Hg

No article	Format	Largeur du produit (cm)	Taille de membre (cm)
1436	<b>B</b>	6,0 - 6,4	12,5 à 15
1443	<b>C</b>	6,6 - 7,2	15 à 24,5
1437	<b>D</b>	7,3 - 7,9	24,5 à 35,5
1434	<b>E</b>	8,7 - 9,2	35,5 à 45
1438	<b>F</b>	9,7 - 10,3	45 à 50,5
1439	<b>G</b>	11,3 - 12,7	50,5 à 60,7
1440	<b>J</b>	17,4 - 19,3	60,7 à 73

Mesurer autour de la partie la plus large de la région  
**TOUJOURS UTILISER UNE DOUBLE COUCHE**

### Application

**Mise en garde : Contient du latex naturel.**



1. Découper une double longueur de Tubigrip pour le membre, en laissant 2 à 3 cm de plus pour le chevauchement.



2. Tirer le bandage Tubigrip comme un bas sur le membre.



3. Doubler Tubigrip sur le membre. S'assurer que le bord supérieur dépasse de 2 à 3 cm la première couche.